

Rotaid 24/7 — Rýchly štart (10 minút)

Inteligentná vonkajšia skrinka pre AED s 24/7 online monitoringom · Article 10.0400.010

IP56

-20 °C

90 dB alarm

2G/4G SIM

GPS

Skontroluj balenie

- Skrinka + transparentné veko + zadná doska (backplate)
- Modul Rotaid 24/7 (SIM + GPS jednotka)
- Transformátor 230 V → 24 V DC
- Skrutky (tapping, Ejot, hmoždinky, skrutka + matica)
- Vrtacia šablóna + manuál + aktivačný voucher s QR

4 kroky inštalácie

1

Vyvrtáť otvory

Šablóna na fasádu, vodováhou vyrovnáť. Vrtáky **8 mm** (4 kotvy) a **10 mm** (kábel). Výška stredu 120–150 cm.

2

Zmontovať skrinku

Hmoždinky → backplate (4 tapping skrutky) → modul (2 Ejot skrutky) → kábel cez fasádu, utesniť silikónom → veko otočiť do zámku, zaistiť skrutkou + maticou.

3

Zapojiť napájanie

Transformátor IBA vnútri budovy. 24 V kábel → modul, 230 V → chránená zásuvka (RCD 30 mA). LED kruh sa rozsvieti.

4

Aktivovať portál

Otvor dashboard.rotaid247.com, vytvor účet, naskenuj QR z voucheru. Pridaj kontakty pre SMS/e-mail alerty.

POZOR: Elektrické pripojenie 230 V smie vykonať iba osoba s elektrotechnickou kvalifikáciou (Vyhláška 508/2009 Z. z.). Pred prácou vždy odpojiť okruh a overiť multimetrom.

Vloženie AED

1. Pootočiť veko proti smeru hodinových ručičiek
2. Vložiť AED s nasadenými elektródami a batériou do vnútorného držiaka
3. Zatvoriť veko a uzamknúť
4. V portáli overiť: pripojené, GPS pozícia, „Heartbeat“ do 5 min

Skrinka prijíma všetky bežné AED s rozmermi do **310 x 295 x 100 mm** — vrátane **Innomed Medical CardioAid-1** (najpredávanejší AED na SK trhu) a ďalších bežných modelov dostupných na slovenskom trhu.

5-bodový test po inštalácii

- ❑ **Alarm:** otvor veko → 90 dB siréna + LED blikanie
- ❑ **Portál:** v dashboarde sa zobrazí udalosť „Cabinet opened“
- ❑ **Notifikácia:** SMS / e-mail prišiel kontaktnej osobe do 60 s
- ❑ **Vyhrievanie:** pri teplote < 5 °C overiť teplý vzduch v skrinke po 15 min
- ❑ **Signál:** v portáli „Signal: OK“, posledný heartbeat do 5 min

Hotovo. Skrinka je v ostrej prevádzke. Detailné funkcie portálu (notifikácie, multi-user, API) sú popísané v dokumente „Manuál Rotaid 247 portálu (SK)“. Plný inštalačný manuál (vrátane troubleshootingu a údržbového kalendára) nájdete na produktovej stránke.

Predajca a technická podpora pre SK

Spencer Medical s.r.o.

Turbínová 13, 831 04 Bratislava

IČO: 51 436 817 · DIČ: 2120707743 · IČ DPH: SK2120707743

Obchodný register MS Bratislava III, oddiel Sro, vložka 126609/B

Výhradný dovozca certifikovaných AED defibrilátorov pre Slovensko

Kontakt

☎ +421 905 888 787 (e-shop)

☎ +421 911 882 888 (predaj a partnerstvá)

✉ obchod@spencermedical.sk

🌐 www.spencermedical.sk

🏠 SK70 0900 0000 0051 4814 7546

Tento dokument je slovenským prekladom originálnej dokumentácie výrobcu Rotaid B.V. (Holandsko).

V prípade rozporu medzi prekladom a originálom je rozhodujúce znenie pôvodnej anglickej verzie.

Verzia SK 1.0 · 2026 · © Spencer Medical s.r.o.